

# KÄYTTÄ MASKIA OIKEIN

1



## OTA MASKI ULOS

Poista hengityssuojain pakkauksestaan puhtailla käsillä korvalenkeistä.

2



## ASETA KORVALENKIT

Aseta hengityssuojain kasvoillesi vetämällä korvalenkit korviesi taakse. Tarkasta, että maski on oikein päin.

3



## MASKIN ASETTELU

Vedä hengityssuojain nenäsi ja leukasi yli. Muovaa suojain istuvaksi nenäsi ympäriltä ja tarkasta, ettei maskin ja ihon väliin jää rakoja.

4



## MASKIN KÄYTTÄMINEN

Käytä kirurginmaskeja vain kerran. FFP2 ja FFP3 -suojaimet sopivat käytettäväksi useammin. Poista maski korvalenkeistä ja pese kätesi.